

Условия хранения и транспортировка

«ОЧКИ МОРФЕЯ™» хранить в сухом отапливаемом помещении. Транспортирование любым видом транспорта, обеспечивающим защиту от влаги и низких (ниже -25°C) температур «ОЧКОВ МОРФЕЯ™».

Гарантийные обязательства аппликатора магнитного «ОЧКИ МОРФЕЯ™»

Изготовитель гарантирует потребителю соответствие параметров и характеристик «ОЧКИ МОРФЕЯ™» требованиям ТУ 9444-021-11153066-2005 при соблюдении потребителем требований, изложенных в инструкции.

Срок службы аппликатора – 3 года

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты покупки, а при отсутствии отметки о продаже – с даты изготовления (выпуска).

Все вопросы, связанные с продажей товара и исполнением изготовителем (продавцом) гарантийных обязательств, регулируются в соответствии с законодательством РФ «О защите прав потребителя».

Гарантия на крепежный шнур и стикер не распространяется.

Гарантийный и послегарантийный ремонт

Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляет фирма-изготовитель: ООО НПФ «НЕВОТОН», Россия, 199048, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д. 66. Тел.: (812) 327-46-96.

Свидетельство о приемке

Аппликатор магнитный «ОЧКИ МОРФЕЯ™» изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 9444-021-11153066-2005 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска (партия №)

Контролер ТК

Изготовитель

ООО НПФ «НЕВОТОН»
Россия, 199048, г. Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 66.
Тел.: (812) 327-46-96
e-mail: info@nevoton.ru
www.nevoton.ru

НЕВОТОН®

Товар получен без видимых повреждений, проверен в моем присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности не имею.

С гарантийными условиями ознакомлен и согласен

Подпись покупателя: _____

Дата: «___» _____ 200__ г.

А П П Л И К А Т О Р М А Г Н И Т Н Ы Й « О Ч К И М О Р Ф Е Я ™ » РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития

Р.У. Хабриев.

15. 11. 2005 г.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Аппликатор магнитный «ОЧКИ МОРФЕЯ™» (далее – «ОЧКИ МОРФЕЯ™») предназначен для восстановления и релаксации организма человека после физических нагрузок и психоэмоционального напряжения.

«ОЧКИ МОРФЕЯ™» предназначены для индивидуального использования в домашних условиях.

Специально сформированная система магнитных полей и светосенсорная изоляция позволяют регулировать процессы сна и бодрствования и нормализовать биологический ритм человека.

«ОЧКИ МОРФЕЯ™» (рис. 1) состоят из диска-аппликатора (далее – диск), магнитных «очков» и соединяющего их эластичного крепежного шнура.

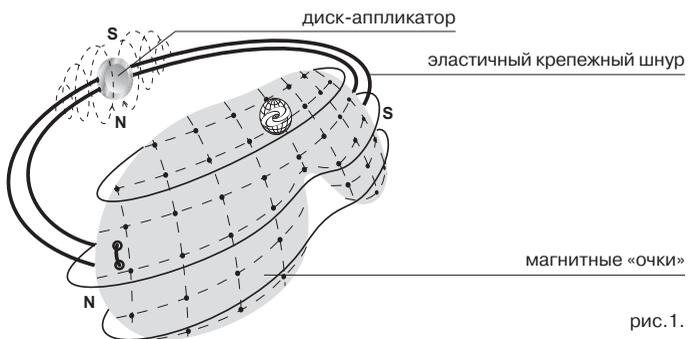

Методики применения

Перед сном

«ОЧКИ МОРФЕЯ™» снимают психоэмоциональное и физическое напряжение, улучшают процесс засыпания и сна.

- процедуру следует начинать за 15-20 минут до отхода ко сну
- перед применением магнитных «очков» умойте лицо прохладной, но не холодной водой
- примите комфортное положение в кровати, предпочтительнее на спине, не скрещивая руки и ноги
- наденьте магнитные «очки» на лицо так, чтобы они плотно закрывали глаза, но при этом старайтесь, чтобы очки комфортно располагались на переносице и не сдавливали голову
- расположите диск в углублении нижней части затылка
- закройте глаза
- для того чтобы отвлечься от неприятных мыслей, повторите несколько раз про себя «шелест листьев, шум прибоя, шепот ветра, нега моря...»
- попытайтесь почувствовать тепло в пальцах рук
- Вы можете спать в «ОЧКАХ МОРФЕЯ™» всю ночь или снять их при наступлении дремотного состояния

Если нарушения сна и психоэмоциональное напряжение ярко выражены – обратитесь к врачу

Во время рабочего дня

«ОЧКИ МОРФЕЯ™» уменьшают усталость, напряжение, улучшают работоспособность.

Если у Вас есть возможность после обеда уединиться на 10-15 минут, то:

- примите комфортное положение в кресле, не скрещивая руки и ноги
- наденьте магнитные «очки» на лицо так, чтобы они плотно закрывали глаза, но при этом старайтесь, чтобы «очки» комфортно располагались на переносице и не сдавливали голову
- расположите диск в углублении нижней части затылка
- сделайте глубокий медленный вдох, медленно выдохните через рот. При этом выдох должен быть длиннее вдоха. Прodelайте так 3 раза
- время релаксации 10-15 мин.
- очень хорошо, если во время отдыха Вам удастся вздремнуть хотя бы несколько минут

Совет: поставьте будильник или таймер на мобильном телефоне на 10 минут. Этого времени Вам хватит, чтобы Вы чувствовали себя свежим и отдохнувшим.

В период после стрессовой ситуации

«ОЧКИ МОРФЕЯ™» снимают психоэмоциональное и физическое напряжение, нормализуют общее состояние.

- примите комфортное положение в кресле, не скрещивая руки и ноги, положите руки ладонями вверх
- наденьте магнитные «очки» на лицо так, чтобы они плотно закрывали глаза, но при этом старайтесь, чтобы очки комфортно располагались на переносице и не сдавливали голову
- расположите диск в углублении нижней части затылка
- сделайте 3 глубоких медленных вдоха, и медленно выдохните через рот, вытянув губы трубочкой
- крепко, но не больно сожмите правой рукой запястье левой и совершите левой кистью по 4-6 медленных вращательных движения в обе стороны. Затем повторите то же с другой рукой.
- время релаксации 10-15 мин.

После напряженных занятий спортом

«ОЧКИ МОРФЕЯ™» уменьшают физическое напряжение через механизмы рефлекторного взаимодействия и позволяют мышцам всего тела расслабиться и восстановиться после тяжелой физической нагрузки, избежать переутомления.

Процедуру можно проводить в любое время при накоплении напряжения и усталости мышц, но лучше всего это сделать как можно раньше после окончания тренировки:

- примите комфортное положение в кресле или на кушетке
- наденьте магнитные «очки» на лицо так, чтобы они плотно закрывали глаза, но при этом старайтесь, чтобы очки комфортно располагались на переносице и не сдавливали голову
- расположите диск в углублении нижней части затылка
- закройте глаза и прислушайтесь к своему телу, мысленно проследите, как расслабляется каждая мышца вашего тела.
- время релаксации 10-15 мин.

Во время полета на самолете, поездки в поезде, в автомобиле

«ОЧКИ МОРФЕЯ™» снимают волнение и напряжение, позволяют расслабиться и продуктивно отдохнуть во время поездки.

- примите комфортное положение в кресле, не скрещивая руки и ноги
- наденьте магнитные «очки» на лицо так, чтобы они плотно закрывали глаза, но при этом старайтесь, чтобы очки комфортно располагались на переносице и не сдавливали голову

Приятного путешествия!

Показания к применению:

- повышенное психо-эмоциональное напряжение
- раздражительность
- эмоциональная лабильность
- неврастения
- астенические состояния (повышенная утомляемость)
- диссомния (нарушения сна, трудности при засыпании)
- вегето-сосудистая дистония (соматоформная дисфункция)

Противопоказания к применению:

острый период инфаркта миокарда или инсульта; эпилепсия; наличие воспалительных заболеваний кожных покровов лица; активный туберкулез легких; наличие имплантированных стимуляторов, металлических конструкций в черепе; выраженная артериальная гипотония; тиреотоксикоз; злокачественные новообразования; беременность (1 триместр); глаукома.

Уход за изделием

По мере необходимости при загрязнении аппликатора «ОЧКИ МОРФЕЯ™» необходимо провести гигиеническую обработку: – протереть влажной хорошо отжатой салфеткой, смоченной в мыльном растворе – а затем влажной хорошо отжатой салфеткой, смоченной в водопроводной водой

Разработано ООО НПФ «НЕВОТОН»:

Технический директор

В.М. Бродкин

Медицинский соисполнитель:

Доцент кафедры физиотерапии

и курортологии СПб МАПО, к.м.н.

А.В. Максимов

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Основные сведения об изделии «ОЧКИ МОРФЕЯ™»

Аппликатор магнитный «ОЧКИ МОРФЕЯ™»

ТУ 9444-021-11153066-2005

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
№ ФС 02012005/2611-05 от 30.11.2005.

Сертификат соответствия ГОСТ Р

№ РОСС RU.ИМ18.В00169 от 15.12.2005.

Технические характеристики

Величина индукции магнитного поля в точках максимума на рабочей поверхности элементов «ОЧКОВ МОРФЕЯ™», мТл6-15
масса «ОЧКОВ МОРФЕЯ™», не более, г80

Комплектность

Аппликатор магнитный «ОЧКИ МОРФЕЯ™»..... 1 шт.
Руководство по эксплуатации..... 1 шт.
Коробка..... 1 шт.